

VACUSLIM 48

PROFESSIONAL BODY SLIMMING INNOVATION

Look Good! Feel Good!

Re
shape
your
body



VACUSLIM 48 PROFESSIONAL

- 12 Behandlungen zu neuem Aussehen
- Sichtbare Ergebnisse schon nach 30 Minuten

Innovative Methode zur Abnehmbehandlung, Straffung der Körperhaut und Beseitigung von Cellulite

NEUE FORMEL

Kräftige Wirkstoffe haben noch stärkeren Effekt aufs Abnehmen und auf die Beseitigung von Cellulite

ABNEHMEFFEKT (SLIMMING EFFEKT)

Schneller Abbau von Fettdepots und Verlangsamung der Bildung von neuen Fettzellen

STRAFFENDER EFFECT (FIRMING EFFEKT)

Straffung, Spannung und Erhöhung des Hauttonus

PRESS & SAUNAEFFEKT

Effekt der lymphatischen Drainage und Beseitigung von Toxinen



PROFITIEREN

DRAINAGE EFFEKT

Übermäßige Flüssigkeitsbeseitigung und Beseitigung von Toxinen

ANTI-CELLULITE-EFFEKT

stärkere periphere Zirkulation führt zur schnelleren Beseitigung von Cellulite

CARBOXY EFFEKT

Das Vakuum ermöglicht den erhöhten Sauerstoffzufuhr in die Zellen und tiefere Eindringung der Wirkstoffe

Die Vacuslim 48 Anti-Cellulite- und Abnehmmethode kann als individuelle Behandlung oder als Ergänzung verwendet werden, um schnellere und bessere Ergebnisse bei Anti-Cellulite - und Abnahmebehandlungen mit kosmetischen Geräten der Mesoporation, Kavitation, Radiowellen, Elektrostimulation, Madero - Therapie und Anti-Cellulite-Handmassagen zu erzielen.

Wirksame Bestandteile



SymFit – revolutionäres Bestandteil in Anti-Cellulite-Programmen

Reduziert die Bildung und Vermehrung von Fettzellen (Adipogenesis). Reduziert und verhindert die Zunahme von Fettzellen (Lipogenesis). Erhöht die Fettverbrennung und reinigt den Körper. Verringert die sichtbaren Anzeichen von Cellulite.



L-Carnitine

Regt die Verbrennung von Fettsäuren an, hilft beim Transport von Fett in die Mitochondrien, wo die Fette in Energie umgewandelt werden.



Rutinsulfate

Rutinsulfat ist eine wichtige Zutat, um Cellulite und das Gefühl von schweren Beinen zu reduzieren. Dieses Bioflavonoid verbessert die periphere Zirkulation, ermöglicht die Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen und entfernt schädliche Substanzen aus dem Gewebe.



Koffein

Ein starkes Antioxidans, das Fett in tieferen Hautschichten abbaut und gleichzeitig die Mikrozirkulation verbessert.



Thermolate (Smart warming-Effekt)

Beschleunigt die Zirkulation und verursacht ein angenehmes Wärmegefühl auf dem Körper. Dieses Gefühl kann 30 Minuten bis 2 Stunden dauern.



Wilder Kastanienextrakt

Wilder Kastanienextrakt, Escin, lindert die Symptome müder und angespannter Beine, reduziert Schwellungen der Beine.



Efeu-Extrakt (Hedera Helix)

Enthält Substanzen, die effektiv gegen Cellulite kämpfen und das orangenartige Aussehen der Haut verringern.



Algenextrakt

Hydratisiert intensiv und erfrischt die Haut.



Komplex mit ätherischen Ölen

Komplex mit ätherischen Ölen- Zitrone, Zimt, Orange und Rosmarin- sowie der Komplex-Bergamotte, Minze und Lavandel- erfrischen und entspannen die Haut, sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild.

VACUSLIM 48 START UP SET Professional

- Thermo Slimming Serum 1, 500 ml / 1 Stk. (VS-01)
- Slimming & Firming Creme 2, 500 ml / 1 Stk. (VS-02)
- Anti-Cellulite & Firming Massage Öl, 500 ml / 1 Stk. (VS-03)
- Vacuslim Vakuumbbeutel (30 Stk)
- "Start up" Zubehör
- Schulung mit Zertifikat
- + 3 Sets für Pflege zu Hause
- Thermo serum 1 Roll-on, 50 ml / 3 Stk. (VSH-01)
- Slimming & Firming Creme 2, 200 ml / 3 Stk. (VSH-02)



VACUSLIM 48 EXPERT SET Professional

- Thermo Slimming Serum 1, 500 ml / 2 Stk. (VS-01)
- Slimming & Firming Creme 2, 500 ml / 2 Stk. (VS-02)
- Anti-Cellulite & Firming Massage Öl, 500 ml / 1 Stk. (VS-03)
- Vacuslim Vakuumbbeutel / 50 Stk.
- Zubehör für "Expert set"



VACUSLIM 48 HAND SET

- Beutel für Arme mit Zubehör / 40 Stk.

VACUSLIM 48 – Gebrauchsanweisung



1. Für den professionellen Gebrauch.



2. Für gesunde Personen ab 18.



3. Nicht anwenden bei folgenden Krankheiten bzw. Zuständen: Bluthochdruck, Diabetes, nach Operationen (min. 6 Monaten), bösartigen Erkrankungen, schweren Nierenproblemen, Epilepsie, Hautveränderungen wie Dermatitis, Ekzeme, Psoriasis und bei Schwangeren, stillenden Frauen, gerade nach dem Kaiserschnitt (min. 6 Monaten), gleich nach dem Solarium, der Haarentfernung und während des weiblichen Zyklus.



4. Wenn der Kunde an Krampfadern leidet, wird auf diese Körperstellen nur CREME 2 aufgetragen.



5. Es ist gut VACUSLIM 48 mit der Madero-Therapie, Anti-Cellulite-Handmassage, Kavitation, Mesoporation und Elektrostimulation zu kombinieren.



6. Wenden Sie VACUSLIM 48-Behandlung alle zwei Tage an.



7. 10-12 Behandlungen insgesamt.



8. Die Behandlungen wiederholen, bis die gewünschten Ergebnisse von den Kunden erreicht sind.



9. Die Kunden an die Wichtigkeit der regelmäßigen Anwendung von VACUSLIM 48-Produkten für Pflege zu Hause erinnern.

Arbeitsprotokoll VACUSLIM 48 für professionelle Behandlung

1 Die MESSUNG

messen Sie nach dem gegebenen Muster im Arbeitsblatt das Gewicht des Kunden und schreiben Sie die Werte auf.

2 TRAGEN SIE VACUSLIM 48 THERMOSERUM 1 VON DER TAILLE BIS ZU DEN FÜßEN AUF

Den Kunden im Stehen von der Taille bis zu den Füßen mit SERUM 1 einkremen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Hände mit Handschuhen schützen.

3 TRAGEN SIE VACUSLIM 48 CREME 2 AUF - von der Taille bis zu den Füßen

4 Während der Kunde steht, wird der Körper in dem VACUSLIM 48 BEUTEL verpackt

Das obere Teil des Beutels mit einem unter Brust (5 cm über dem Nabel) platzierten **ELASTISCHEN BAND** schließen. Schnüren Sie den Kunden nicht ein.

6 BRINGEN SIE DEN KUNDEN IN EINE LIEGENDE POSITION

In das untere Teil des Beutels das Schlauchende stecken und die Luft herausaugen, um so ein Vakuum zu erschaffen und dann das untere Teil mit dem entsprechenden Band schließen.



7 LASSEN SIE DEN KUNDEN 30 MINUTEN RUHEN

8 MASSIEREN SIE DANN DEN KUNDEN 3-5 MINUTEN MIT VACUSLIM 48 ÖL 3

9 MESSEN SIE DAS GEWICHT DES KUNDEN

10 TEILEN SIE IHR ERGEBNIS

in sozialen Netzwerken, mit Hashtag #vacuslim und #vacuslim48.

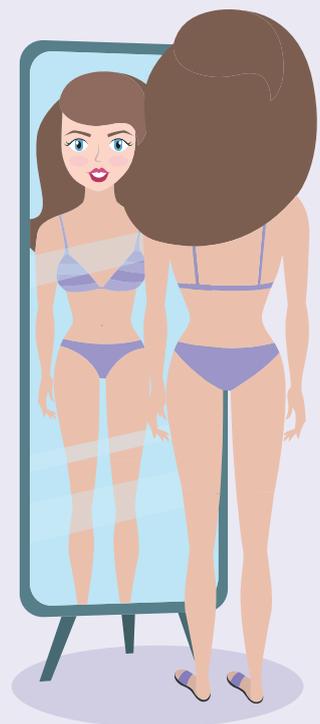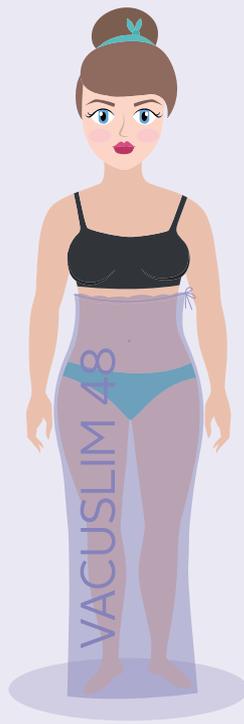

Vacuslim 48 Behandlung für Arme

Tragen Sie Serum 1 und dannach Creme 2 auf. Schließen Sie mit dem elastischen Band das obere Teil des Beutels (nach 3 Minuten das Band entlasten). Saugen Sie die Luft aus dem unteren Teil heraus und schließen Sie es.

ODEA INTERNATIONAL SRL Milano, Viale Abruzzi 9, 20131 (MI) Italia
+39 348 7409822 shop@vacuslim48.com
#vacuslim48 #vacuslim  vacuslim48.global

Internationale Verteilung:
+43 66 77 95 22 33 sales@vacuslim48.com
www.vacuslim48.com  vacuslim48_official

mesmerie
PUISSANCE DE LA BEAUTÉ